

バイオリジカルインジケータ―(BI)

(高圧蒸気滅菌用)

《使用説明書》

保管上のご注意


- ・ 2~25℃、RH 20%~80%で遮光保管してください。
- ・ 滅菌器や殺菌消毒剤から離れた場所に保管してください。

使用方法

- 1 ACE test に貼られているラベルの空白箇所に滅菌管理上の必要事項(例:実施日時・箇所等)を油性ペンで記入し、ACE test を適切なパックに入れ、滅菌器の中で最も蒸気が達しにくい箇所に置いて、滅菌処理を行ってください。
- 2 滅菌処理後直ちに滅菌器から取り出し、ラベルのケミカルインジケータ―が青色から黒色に変色していることを確認してください。
- 3 十分放熱させた ACE test を写真のようにクラッシャーにセットし、アンプルを割ってください。キャリアーが培地の中に完全に浸漬していることを確認してください。



注意: 絶対にアンプルを手で割らないでください。作業時は傷つけないように必ず保護メガネ・マスク・手袋を着用してください。

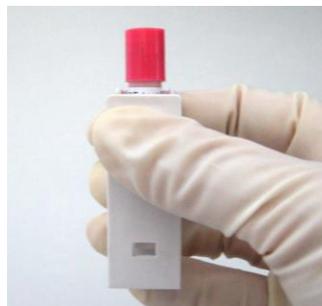

- 4 アンプルを割った後、ACE test を垂直に保ったままインキュベーターに入れ、**55~60℃**で培養してください。
- 5 陽性コントロール: 滅菌処理をしていない ACE test のアンプルを割り、同様にインキュベーターにて培養します。陽性コントロールは、使用毎に行ってください。
- 6 48 時間以上の培養を行う場合、培地の蒸発を防ぐためにパラフィルムを使い、キャップ全体を密封してください。

注意: 培養の際、必ず ACE test を立たせた状態で培養してください。

結果判定

陰性

培地の色は紫色から変化なし ⇒ 滅菌完全

陽性

陽性コントロールのように、培地の色変化あり(紫色から黄色) ⇒ 滅菌不完全
陽性になる原因として次の3つが考えられる。

- ①被滅菌物による影響
- ②BIの培養手技の問題
- ③滅菌器本体の問題



FUKUZAWA®

製造者

上海福沢医薬器材有限公司

<http://www.fzme.com>

発売者

福沢商事株式会社

〒233-0013 横浜市港南区丸山台 2-36-30

TEL:045-845-2699 FAX:045-845-2889