

Geobacillus stearothermophilus

菌種用培地

《使用説明書》

保管上のご注意

- ・ 2～10℃で遮光保管してください。

使用前のご注意

- ・ 使用前に有効期限をご確認ください。
- ・ 使用前に本品の完全性をご確認ください。
- ・ 冷蔵庫から取り出し、室温になってから使用してください。

培地成分

培地:ソイビーン・カゼイン・ダイジェストブロス

指示薬:プロム・クレゾール・パープル

廃棄際のご注意

- ・ 滅菌不十分と判定された時、培地は必ず滅菌処理(121℃、30分)を行った後廃棄してください。

使用方法

- 1 蒸気滅菌、過酸化水素滅菌など終了後、芽胞ストリップが入った紙袋をクリーンベンチに持っていきます。
- 2 無菌状態で紙袋からストリップを培地に移り入れます。
- 3 蓋を締め、専用の「ACE mini インキュベーター(品番:H8200)」にて **55～60℃**で24時間、48時間または七日間を培養します。
- 4 陽性コントロール: 滅菌処理をしていない紙袋からストリップを培地に移り入れ、同様にインキュベーターにて培養します。陽性コントロールは、使用毎に用いてください。

結果判定

陰性

⇒ 培地の色は紫色から変化なし ⇒ 滅菌完全

陽性⇒ 陽性コントロールのように、培地の色変化あり(紫色から黄色)
⇒ 滅菌不完全

製造者

上海福沢医薬器材有限公司

<http://www.fzme.com>

発売者

福沢商事株式会社

〒233-0013 横浜市港南区丸山台 2-36-30

TEL:045-845-2699 FAX:045-845-2889